



Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x6x6 cm HMI nr.: 38788 Varenr.: SP1416	46x46x6x6 cm HMI nr.: 31344 Varenr.: SP1818
41x41x6x6 cm HMI nr.: 31341 Varenr.: SP1616	46x51x6x6 cm HMI nr.: 31345 Varenr.: SP1820
41x46x6x6 cm HMI nr.: 31342 Varenr.: SP1618	51x46x6x6 cm HMI nr.: 101002 Varenr.: SP2018
46x41x6x6 cm HMI nr.: 31343 Varenr.: SP1816	51x51x6x6 cm HMI nr.: 31346 Varenr.: SP2020



Stimulite® Sport pude

Lav og flad siddepude til den aktive bruger

Puden anvendes til at forebygge tryksår hos brugere i lav- og medium risikogruppen.

Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er stødabsorberende, til den aktive bruger eller brugeren der dyrker kørestolsport.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt	Max 100 kg
Vægt	1,6 kg