

Zibo Pius

Quickguide

Denne guide vil hjælpe dig, med at komme igang med madrassen. Det enkle panel på toppen af pumpen samler funktionerne og indikerer madrassen tilstand via lysdioderne



Tænd/sluk for pumpen



Indstil pumpe til brugerens vægt

Knapperne '+' og '-' bruges til at justere i forhold til brugerens vægt. Systemet vil som standard være indstillet til 70 kg ved opstart.



Vekseltryk funktion

Dynamisk funktion der får luftcellerne til at skiftevis at fyldes/tømmes for luft. Luftsiftet i cellerne stimulerer huden.



Alarmer

Lys udfor mmHg og den gule advarselstrekanter angiver et trykproblem i madrassen.



Statisk funktion

Alle luftcellerne vil have samme konstant lave tryk i cellerne. Anbefalet til patienter der ikke tåler uroen fra den dynamiske funktion f.eks. smertepatienter.

Lavtryksalarm:

Den røde LED-pære blinker langsomt. Kontroller for lækage f.eks. åben CPR-ventil, koblinger og hul i luftcelle.

Højtryksalarm:

Den røde LED blinker hurtigt. Kontroller om en luftslange er klempt, eller om der er en ekstra belastning på madrassen f.eks. udstyr eller en gæst der sidder på den.



Plejeindstilling/Max.firm

Funktionen benyttes til pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk, det kan tage op til 6 minutter, Efter 20 minutter vender systemet automatisk tilbage til standard programmet P3, hvorefter man skal vælge ønsket program. For selv at slå funktionen Plejeindstilling fra, tryk på knappen igen.



Systemfejl

Den røde LED-pære ved siden af svensknøglen blinker, og der høres også en alarm. Kontakt ZiboCare for service af madras og pumpe.

Har du brug for hjælp, så kontakt os på
Tlf.: +45 76 900 407
E-mail: post@zibocare.dk
www.ZiboCare.dk


ZiboCare®