


Pro-care Auto Plus Bariatric

Trykaflastende madras – med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Plus Bariatric er en dynamisk trykaflastende helmadras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig patientens vægt og lejrning. Madrassen består af støjsvage luftceller, som giver patienten ekstra støtte og komfort.

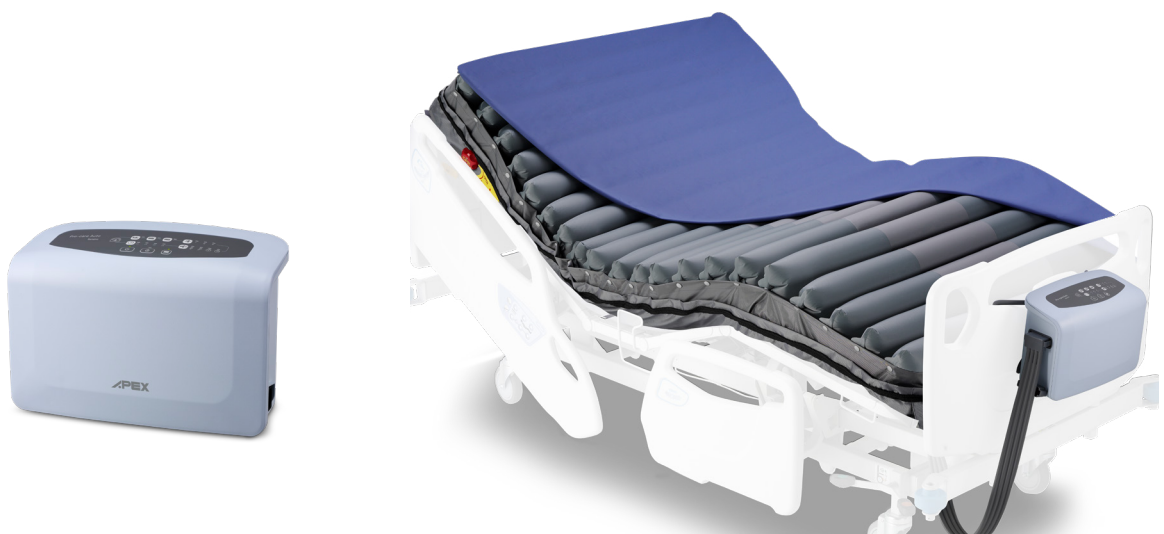

Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.

Opbygning

Madrassen består af 20 luftceller, der hver er 10 cm bredde. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.

Brugertilpasset tryk

Madrassen indstiller automatisk trykket efter patientens vægt og lejrning. Pumpen kører i en cyklus, som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til statisk.

Hælfunktion

De nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der dannes O-tryk under hælene.

Flere cyklustider og terapiformer

Madrassen har variable cyklustider: 10, 15, 20 og 25 min, så patienten kan få ro om natten. Med de tre terapiformer: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk er madrassen ideel til alle brugere.

Autofirm-funktion

Funktionen Autofirm gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra efter 20 min.


Betræk til optimal hygiejne

Betrækket er vandtæt, strækbart og åndbart, og fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Plus Bariatric .

Pro-care Auto Plus Bariatric

Trykaflastende madras – med selvindstillende pumpe

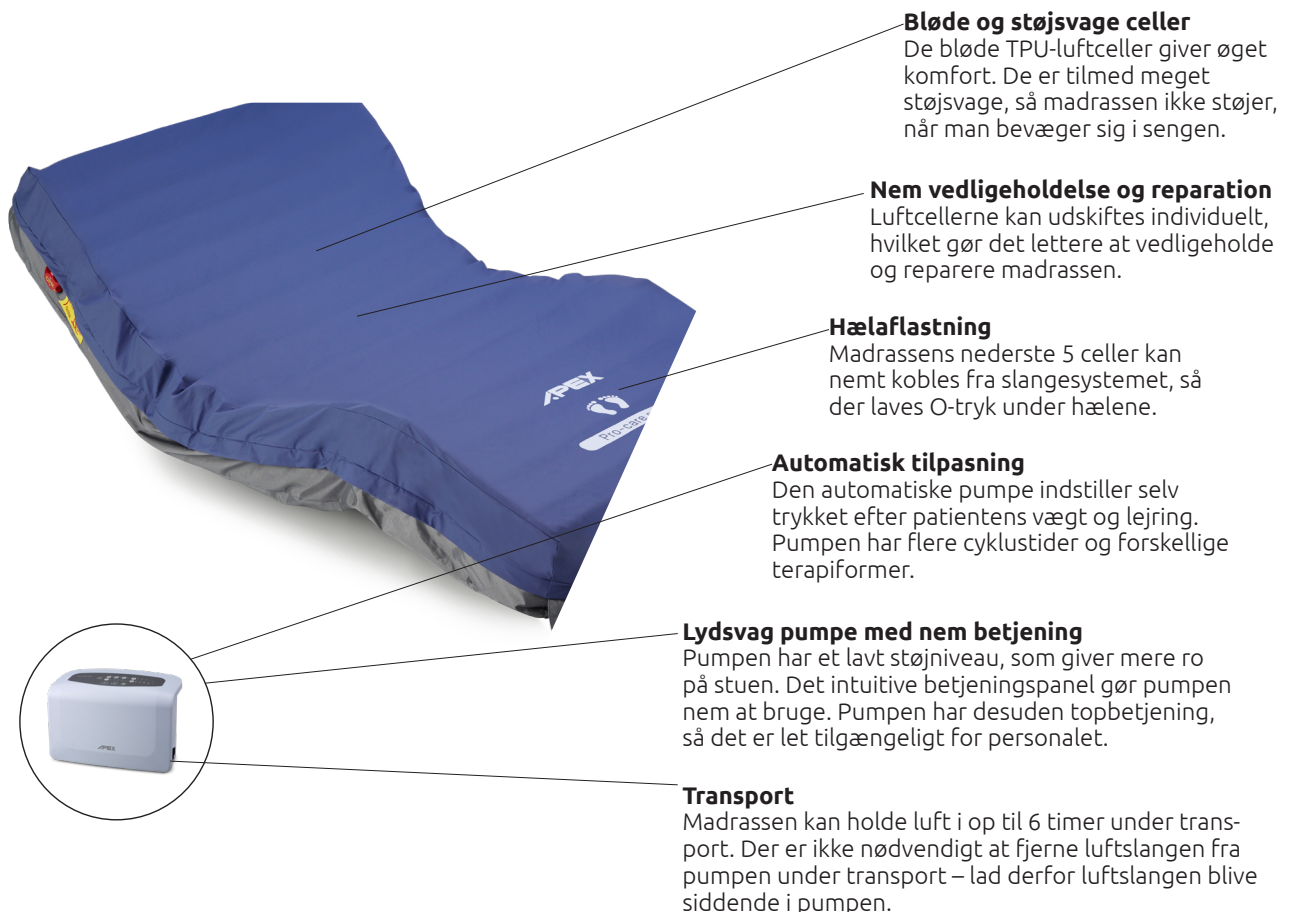

Bløde og støjsvage celler

De bløde TPU-luftceller giver øget komfort. De er tilmed meget støjsvage, så madrassen ikke støjer, når man bevæger sig i sengen.

Nem vedligeholdelse og reparation

Luftcellerne kan udskiftes individuelt, hvilket gør det lettere at vedligeholde og reparere madrassen.

Hælaflastning

Madrassens nederste 5 celler kan nemt kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene.

Automatisk tilpasning

Den automatiske pumpe indstiller selv trykket efter patientens vægt og lejrning. Pumpen har flere cyklustider og forskellige terapiformer.

Lydsvag pumpe med nem betjening

Pumpen har et lavt støjniveau, som giver mere ro på stuen. Det intuitive betjeningspanel gør pumpen nem at bruge. Pumpen har desuden topbetjening, så det er let tilgængeligt for personalet.

Transport

Madrassen kan holde luft i op til 6 timer under transport. Der er ikke nødvendigt at fjerne luftslangen fra pumpen under transport – lad derfor luftslangen blive siddende i pumpen.

Dynamisk luftmadras

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto Plus Bariatric er ideel til bl.a. Behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisikobrugere, bariatriske borgere og patienter der ikke kan/vil repositionere sig selv, smerteplagede, sensitive.

Pro-care Auto Plus Bariatric fås i flere udgaver:

107x200x20 cm

HMI nr.: 134719

Varenr.: 70756

122x200x20 cm

HMI nr.: 134720

Varenr.: 70755

Brugervægt: 30-450 kg

Madrasvægt: 10 kg

Sammensætning:

20 støjsvage TPU-celler, cell-on-cell

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 3,8 kg

Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm

Indstillinger: 1:2 cyklus m. intervaller på 10, 15, 20 og 25 min

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.